



BOOK AUDIO オートモード クイックマニュアル

① 付属品をつないでセットする

本体の背面パネルに付属品を接続し、
「選別検査切替スイッチ」がご使用に応じた
設定になっていることを確認してください




- ① 一般健康診断
- ② 雇入れ時健康診断
- ③ 学校健康診断



※2人用、5人用の場合


ヘッドホンと応答スイッチは、本体の番号と合うように
接続してください

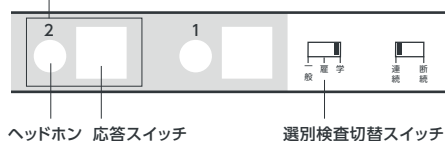

② 電源ボタンを押す

起動時はマニュアルモードの状態点灯します


※右耳4000Hzの設定が表示されます

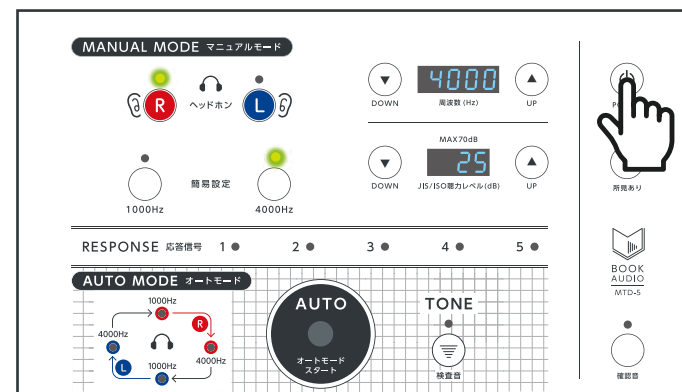

③ オートボタンを押す

R 1000HzのLEDが点灯します


※オートボタンを押すごとに、各周波数の設定に切り替わります

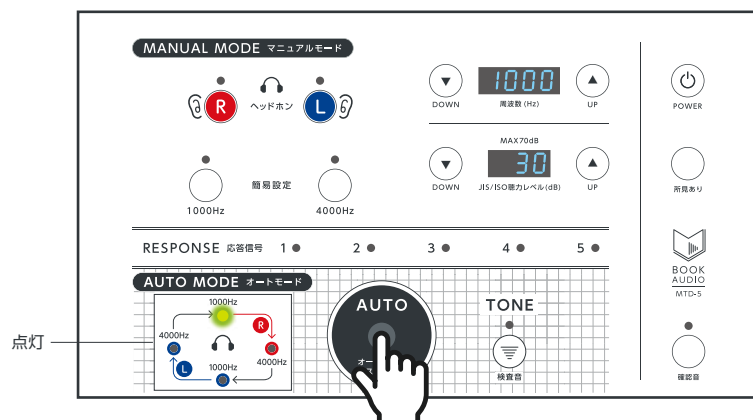

④ 聴力検査 右耳 周波数1000Hz

R 1000HzのLEDが点灯していることを確認してください
検査音ボタンを押す／戻す操作で応答信号の反応を確認します

表示中の聴力レベル

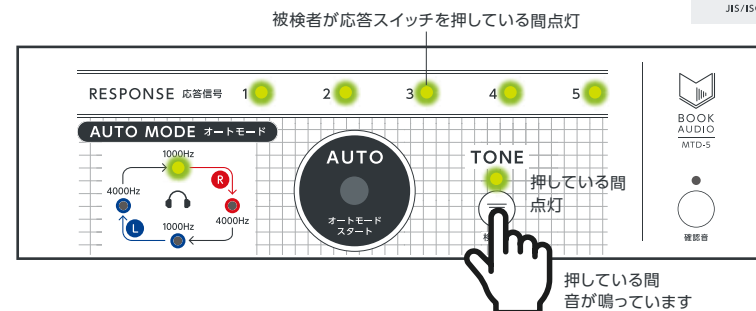

反応が正常の場合、オートボタンを押して **右耳 周波数4000Hz** へ


⑤聴力検査 右耳 周波数4000Hz

Ⓡ 4000HzのLEDが点灯していることを確認してください
検査音ボタンを押す／戻す操作で応答信号の反応を確認します

表示中の聴力レベル



被検者が応答スイッチを押している間点灯

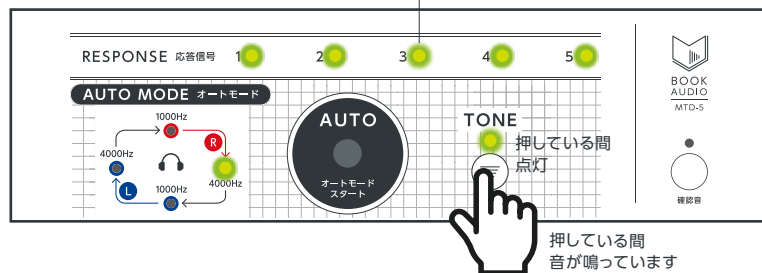

反応が正常の場合、オートボタンを押して 左耳 周波数1000Hz へ


⑥聴力検査 左耳 周波数1000Hz

Ⓛ 1000HzのLEDが点灯していることを確認してください
検査音ボタンを押す／戻す操作で応答信号の反応を確認します

表示中の聴力レベル



被検者が応答スイッチを押している間点灯

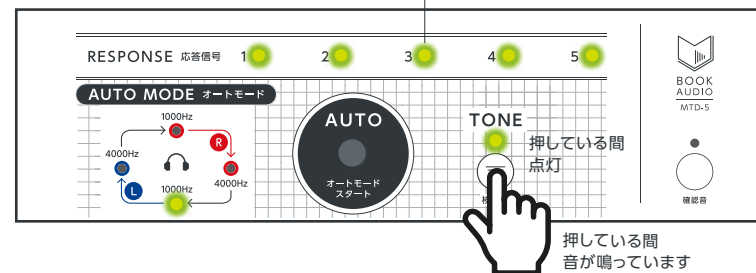

反応が正常の場合、オートボタンを押して 左耳 周波数4000Hz へ


⑦聴力検査 左耳 周波数4000Hz

Ⓛ 4000HzのLEDが点灯していることを確認してください
検査音ボタンを押す／戻す操作で応答信号の反応を確認します

表示中の聴力レベル



被検者が応答スイッチを押している間点灯

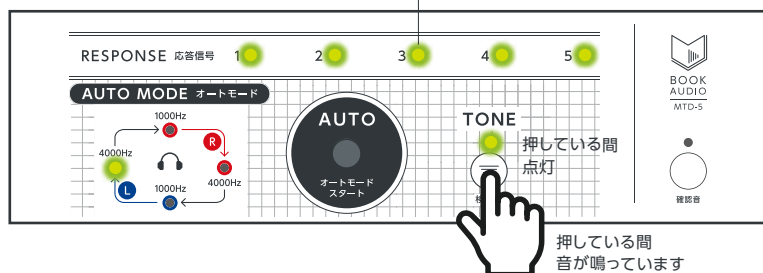

反応が正常の場合、オートボタンを押して検査終了へ

⑧検査終了

LEDが消灯します
もう1度オートボタンを押すと③に戻り、次の検査ができます

