

かんたん・やさしい ミミーの補聴器

Point 1

SELECTONE
セレクトーン

※セレクトーンは
三和製作所の音質調整機能を
あらかず登録商標です。

自由な音質・音量調整

一般的な補聴器は、専門店で定期的に
フィッティング(調整)が必要になります。
ミミーの補聴器は音質を体調や環境に合わせて
自分で調整できます。

Point 2

誰でも使えるシンプル操作

よく動かす場所はスライドとダイヤルの2つだけ。
直感的にわかるシンプルな操作で、誰でも
かんたん・ストレスフリーでご利用いただけます。

Point 3

おまとめやすい価格設定

補聴器を使ってみたくて、高価で手がでない…
そんな方にも、リーズナブルな価格のME-145は
はじめての補聴器におすすめの機種です。

※補聴器は適切なフィッティングでその効果が発揮されますが、
装着者(使用者)のきこえの状態によっては効果が異なる場合があります。

補聴器について お気軽に ご相談ください

経験豊富なスタッフが
お客様にピッタリの補聴器を
わかりやすく丁寧に
ご案内いたします



補聴器保証制度

1年間無償保証

保証期間内に生じた本体の自然故障に
ついて無償で修理いたします。

有償保証

保証期間経過後及び期間内の自然故障以外に
についても、責任を持って修理いたします。

※保証は補聴器本体についてのみ有効です。

- 製品は改良のため、予告無く変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なる場合がございます。
- このカタログは、2022年5月現在のものです。

sanwa

株式会社 三和製作所

ミミー電子事業部: 〒190-0003 東京都立川市栄町6-16-1
tel.042-538-3316 fax.042-538-3317



<お問い合わせは> 平日10:00-17:00(土日祝日除く)

0120-331-756

きこえをサポートするお近くの代理店

日本製



はじめての一步は ミミーの補聴器

POKKE sel1



実寸サイズ!

ME-145

<適応聴力範囲>

軽度～高度難聴初期

の方へ



ポケット型補聴器 ME-145

POKKE sel1

ポッケ エスイーエルワン

きこえるって、
気持ちがあったわること。

大切なひとが笑っている。

そこに、笑い声がきこえたら、

よろこびやうれしさが、もっとつたわらと思う。

「きこえの悩みを解消したい」そう思ったその日から、

ミミーの補聴器は、あなたのささえになれる。

あなたと大切なひとが、

おなじ気持ちで、笑いあえますように。



音質調整
スライド

H 高い周波数を強く

言葉がこもる場合にスッキリきこえます。
室内など静かな場所では聞き取りやすくなります。

N 低音と高音をバランスよく

音がキンキン響く場合に音質が柔らかくなります。
雑音の多い場所では落ち着いた音質になります。

L 低い周波数を強く

MT切換スイッチ

「T」に切り換えると、
イヤリングループ装置が設置されている
会場や、Tコイルを利用する機器を使って
音声を聞くことができます。




90dB入力最大出力 音圧レベル	ピーク値	118dB
	HFA	115dB
最大音響利得	ピーク値	56dB
	HFA	44dB
誘導コイル入力の 最大感度レベル	HFA	81dB
使用電池/電池寿命	単4形アルカリ乾電池(LR03)/約170時間	
本体の大きさ	W50×H80×D20(mm)	
重さ	約60g(電池・イヤホン・コード・耳せん含む)	

※本データは、JIS C 5512:2015に準拠した測定・表示です。

適応 機種	軽度難聴	中等度難聴	高度難聴	重度難聴
ME-145	軽度～高度(初期)			
ME-241	軽度～高度			
ME-240		中等度～重度		

電源
音量調整
ダイヤル

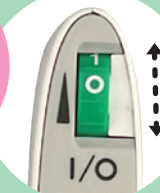

○で電源OFF。1～8まで
音量が調整できます。

【付属品】

- 単4形アルカリ乾電池
- 傘耳せん 中・小(中はイヤホンに付いています)
- イヤホンコード(約75cm) ●イヤホン(NH120)
- ジョイント(イヤホンに付いています)
- ネックストラップ ●マイナスドライバー
- 取扱説明書(保証書付) ●医療機器添付文書

ポケット型補聴器 ポッケ sel1 ME-145

907-400 | ￥19,800 (非課税)

【医療機器認証番号】229AGBZX00116000

Option オプション

ME-145に履かせることで、
衣擦れ音を軽減できます

ポケした ME1456200

907-401 | ￥770 (税込)

